

دستورالعمل سایز کردن لوله کربنی چکاد

جهت تولید لوله‌های کربنی در شرکت چکاد طب آدرین از پارچه‌های مخصوص کربنی و رزین استفاده شده است تا لوله‌ای با مقاومت و استحکام بالا تولید گردد. با توجه به جنس و استحکام ویژه لوله‌های کربنی چکاد این لوله‌ها نیاز به روش برش اختصاصی خود دارند و استفاده از سایر روش‌ها جهت سایز کردن لوله احتمال صدمه به پارچه و تخریب لوله را افزایش می‌دهد. بنابراین جهت سایز کردن لوله‌های تهیه شده مطابق دستورالعمل اقدام نمایید:

- ۱) ابتدا محل برش را توسط متر و لوله برد نشانه‌گذاری کنید.
- ۲) با یک اره آهن بر محل نشانه‌گذاری شده را برش دهید (استفاده از سایر وسایل جهت برش می‌تواند به لوله صدمه وارد نماید)
- ۳) محل برش را با سنگ یا سوهان پرداخت نمایید.
- ۴) با اطمینان خاطر از لوله سایز شده خود استفاده نمایید.



آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر، پلاک ۶۳۳، شرکت چکاد طب آدرین
دفتر تحقیق و توسعه: اصفهان، دانشگاه اصفهان، مرکز رشد و کارآفرینی، اتاق ۱۲۴

 +989386097179

 www.chakadteb.com

 infochakad@gmail.com

 03136276652

 03137932523

 [chakad_teb_adrian](https://www.instagram.com/chakad_teb_adrian)

 @chakadteb